

# Invio Files / Modelli

Software utilizzato:

ExoCAD

3Shape [prossimamente]

Come inviare un modello per:

## Abutment

Modello in gesso con gengiva mobile ed analoghi in ottimo stato. Modello antagonista con registrazione. Ceratura diagnostica (facoltativa). Ceratura moncone in caso di replica.

## Ponti e corone

Modello in gesso con tutti gli elementi estraibili  
Monconi tutti preparati con angolo netto sotto il margine (ditching) con spigoli arrotondati e senza profili simmetrici.  
Ceratura diagnostica o della struttura facoltativa.

## Toronto e barre

Modello in gesso con gengiva mobile ed analoghi in ottimo stato.  
Prova estetica dei denti obbligatoria.  
Per casi complessi inviare anche l'articolatore.

Modulo ordini :

Compilare in tutte le sue parti ed allegare al modello.  
Importantissimo per limitare al minimo i tempi di produzione a causa di informazioni mancanti. Indispensabile indicare la sistematica per cui si richiede il lavoro.

Conferma progetti :

Per la conferma del progetto, l'ufficio CAD/CAM invierà un Pdf 3D dove è possibile visionare tridimensionalmente il progetto per dare l'approvazione o apportare le necessarie modifiche.